

米动健康操作指南

2019年5月

版权申明：本产品目前处于测试试用阶段，有任何问题可以发邮件给我们：lifeng@datawe.net





什么是米动 - 心电咖？

米动 - 心电咖：

米动 - 心电咖是以华米健康手环为心电数据采集设备并依托大微医疗心电咖智能心电信息化系统为用户提供心电自动诊断的联合品牌。

功能说明：

- 米动 - 心电咖是为华米Amazfit 1S（心电健康手环）提供的AI心电诊断服务系统，目前为测试体验版；
- 使用本系统时，请先用米动健康APP采集心电数据并同步至云端，米动 - 心电咖只对米动健康APP同步至云端的心电数据进行诊断；
- 本系统暂时利用“大微医疗”微信公众号对外提供测试服务；
- 本系统暂时只适用于手机号码注册的华米账户。





第一步：注册-登录-填写个人信息

- 按照手环说明书，下载“米动健康”APP

1、已有账号请直接登录

2、新用户请先注册

(目前仅支持手机号注册)

3、输入6位数验证码

4、设置登录密码


5、填写基本信息，点击完成



第二步：添加设备-绑定手环



1、点击“绑定”

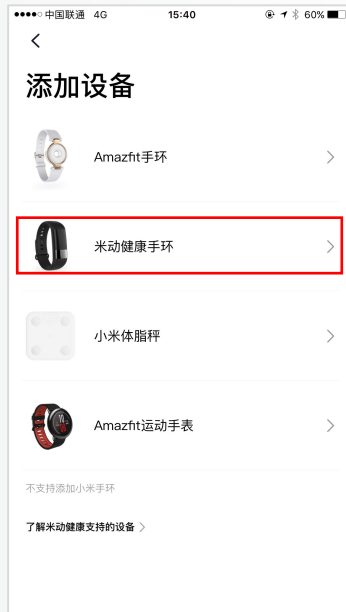

2、选择“米动健康手环”



第三步：数据采集-同步上传

采集方式一：

直接采集——手环佩戴于腕间，将手指放在手环感应区长时间停留（大概一分钟），完成后屏幕显示“上传同步”即视为数据采集成功。



1、手指贴于电极处进行数据采集




2、在“状态”页面下拉刷新，会显示“同步中”，同步完成后，进入到“大微医疗”微信公众号进行AI诊断

采集方式二：

APP采集——打开“米动健康”APP，进入底部标签栏“状态”，点击“测量”，完成心电图数据采集（该采集方式自动同步上传数据，无需刷新）



1、进入“状态”页面

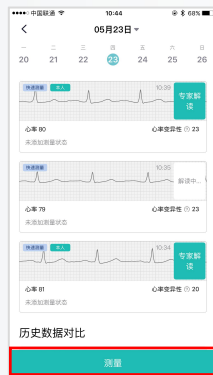

2、点击“测量”




3、选择测量方式（推荐“快速测量”）



4、测量完成，进入到“大微医疗”微信公众号进行AI诊断



第四步：进入“大微医疗”微信公众号

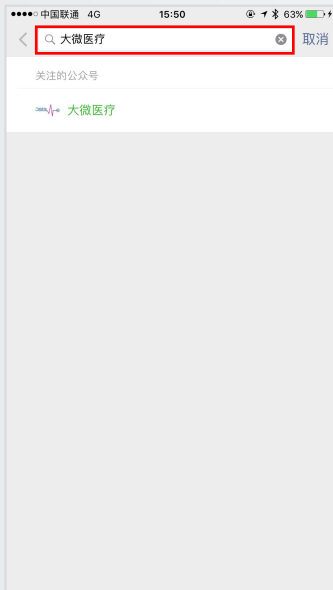

1、搜索“大微医疗”公众号并关注




2、点击右下角“心电咖”



3、选择“米动心电”点击进入



第五步：华米认证和授权

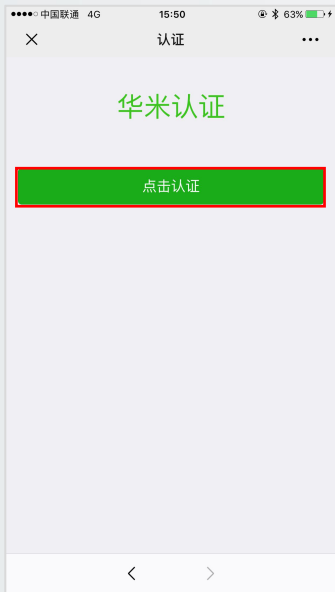

1、“点击认证”进行华米认证



2、输入之前使用手机号进行注册的米动健康帐号及密码进行登录，点击“登录”



3、点击“允许”



第六步：进入米动-心电咖（Beta版）



1、“心电列表”将显示每一次的测量数据



2、“个人中心”可以看到自己的基本信息及历史报告



第七步：AI诊断-推送报告-查看报告



1、选择需要分析的数据
栏（如图）




2、弹窗选择分析方式
（推荐AI高级分析，可获取更多心电图指标）



3、出现“操作成功提示
框”表明分析成功



4、回到“大微医疗”公
众号首页，将看到推送报
告信息，点击即可查看报
告

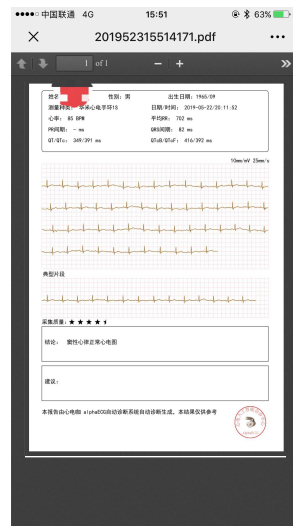

5、查看AI诊断报告



第八步：分享转发报告-查看历史报告



1、如需转发可长按“评估报告通知”，出现选择框后，点击“转发”



2、如果需要查看历史报告：点击右下角“心电图”



3、选择“米动心电”点击进入



4、“个人中心”页面，点击“历史报告”可以查看之前的诊断报告记录（如图）



5、选择要查看的历史报告，点击“查看报告”可以在线浏览（如图）