


心电咖云打印操作说明

目录

一、 综述.....	2
二、 云打印配置.....	3
三、 使用云打印功能.....	6


一、综述

云打印是通过共享 PC 打印机程序（心电咖打印助手）为移动客户端（H1 一体机、医疗平板 P12、心电咖 APP）提供随时随地打印心电报告的服务。并且设置成功后，在动静态心电图业务中可以自动打印报告。其工作原理如下：

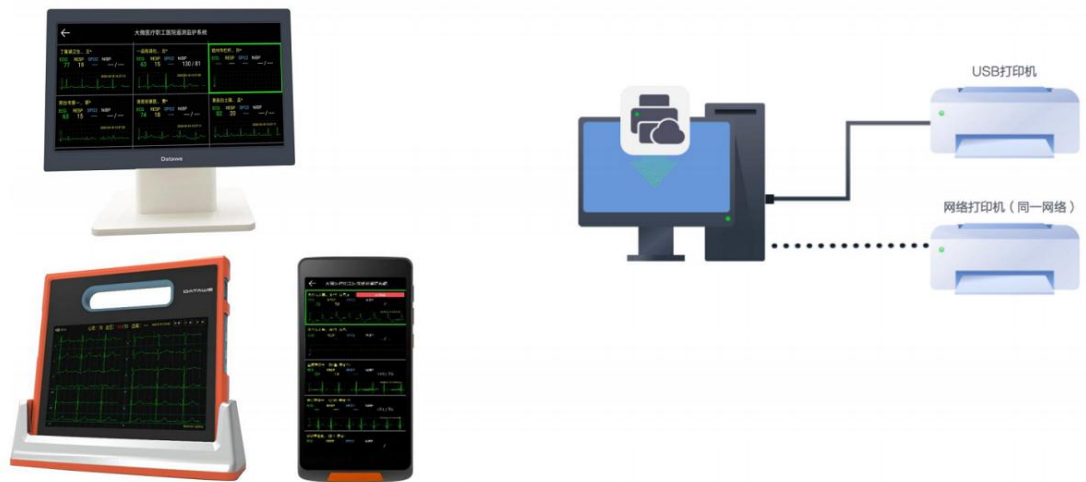

二、云打印配置

1. 在连接打印机的电脑上安装‘心电咖打印助手’应用程序，确保连接打印机电脑的互联网在线且保持畅通（‘心电咖打印助手’应用程序请联系大微管理员处获取）。

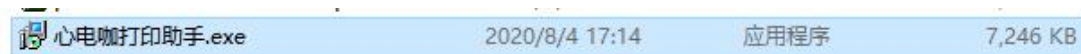

(图 1)

2. 启动并登录心电咖打印助手：使用医院开单医生账号登录即可。同一个账号不能在心电咖打印助手程序同时登录。




(图 2)

3. 添加打印机：进入心电咖打印助手，下拉框选择一台打印机，并点击“添加打印机”按钮，代表添加打印机成功。重复此操作可以添加多台打印机。



(图 3)

4. 测试云打印机连接是否成功：选择已添加的打印机（图 4），进入云打印设置页面（图 5），点击“打印测试页”按钮，查看打印机是否打印测试页，如打印测试页代表云打印机连接成功，否则请联系大微管理员处解决。

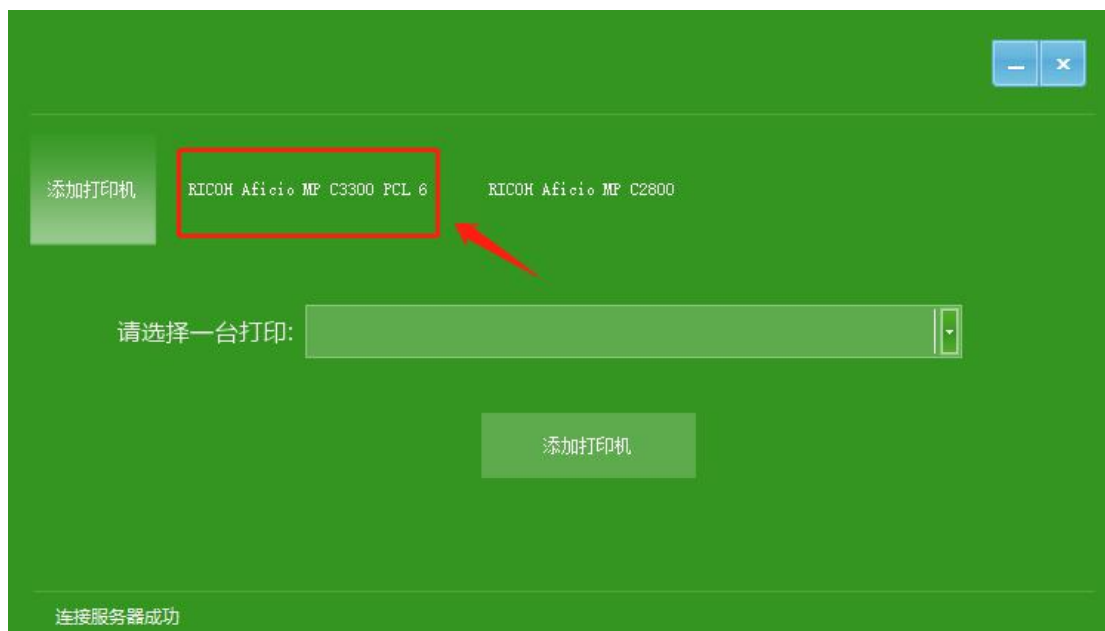

(图 4)



(图 5)

5. 设置默认云打印机：使用心电咖打印助手的账号登录医疗心电服务系统（<http://ecg.datawe.net/ecgConsole/index.htm>）。点击“云打印”菜单，进入“打印机管理”页面（图 6）；选择添加已连接成功的打印机，操作栏点击“默认”按钮，代表默认使用该台打印机（图 7）。



(图 6)

所属人	名称	纸张	彩色	默认打印机	DPI	创建日期	操作
	Microsoft Print to PDF	A4(210.02 * 296.926)	是	否	600	2020-07-29 17:16:36	默认
	MMWIFI-R2D-srv (HP DeskJet 5000 s...	A4(204.09 * 296.926)	是	否	600	2020-07-29 17:19:30	默认
	RICOH Aficio MP C3300 PCL 6	A4 (210 x 297 mm)(201.51 ...	是	是	600	2020-07-30 13:52:49	-

(图 7)

三、使用云打印功能

1. 云打印配置完毕后，自动生成桌面图标，如下图：




(图 1)

2. 登录成功，在任务栏中可查看当前应用程序，如下图：




(图 2)

3. 可以设置电脑开机自动启动“心电咖云打印”程序，选中程序图标右键，点击“开机启动”即设置成功（图 3），并且下一次进入程序免登录，直接进入主界面（图 4）。
如果想切换其他账号登录，点击“切换账号”即可（图 3）。
如果需要退出程序，点击“退出”即退出程序（图 3）。如下图：

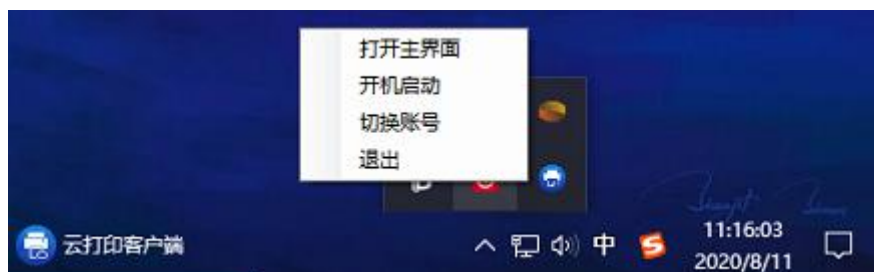

(图 3)

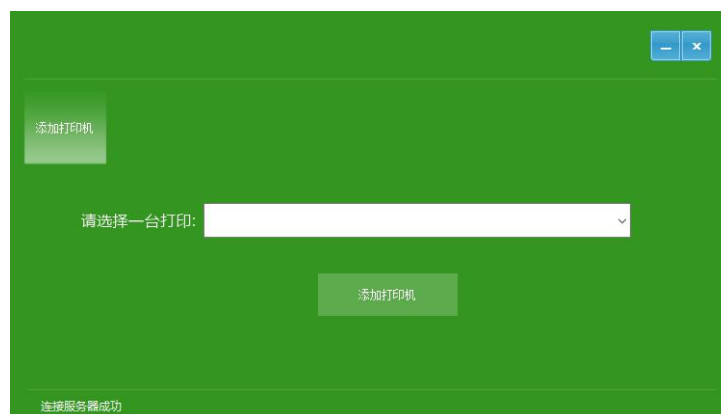


(图 4)

4. 云打印功能暂时对心电咖 APP 和心电咖小程序开放；如下展示心电咖 APP 和心电咖小程序中云打印功能的应用。


① 以心电咖 APP 为例：云打印配置成功，进入心电咖 APP 常规心电图（静态心电图模块），进入“云端报告”菜单（图 5），选择任意已审核的患者报告（图 6），在线浏览报告点击“打印”按钮（图 7），使用云打印机打印患者报告。



(图 5)

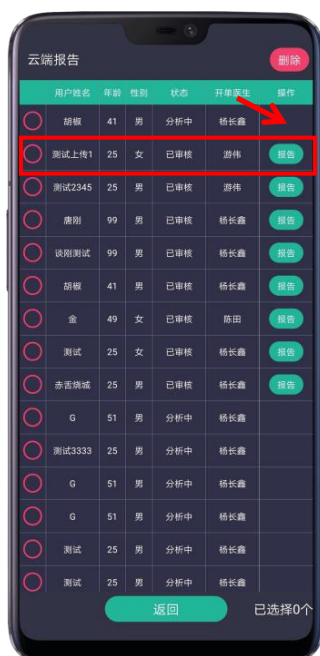

(图 6)

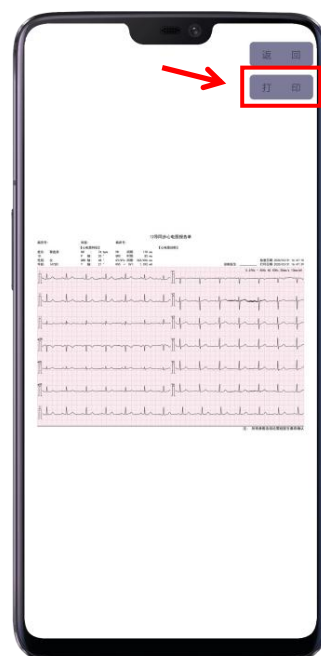

(图 7)

② 以心电咖医生版小程序为例：云打印配置成功，登录（使用心电咖打印助手账号同医院下的任意开单医生账号），进入“已审核”菜单（图 9），选择任意已审核的患者报告，点击“云打印”按钮（图 10），使用云打印机打印患者报告。



(图 8)



(图 9)



(图 10)